

## UTILISATION DE LA JOELETTE

### A. L'EQUIPAGE

LES ACCOMPAGNANTS (3 à 7 personnes)

**Arrière** : PILOTE : dirige la Joëlette et maintient l'horizontalité de la personne assise, bras semi-tendus, avec la sangle au niveau du bas du ventre.

**Devant** : ORIENTATEUR.RICE : Oriente la Joëlette, anticipe les virages, suit les mouvement haut/bas initié par le/la PILOTE, bras semi-tendus/ tendu

**Sur les côtés** : Pareurs : contre les déséquilibres droite/gauche et aide à la pousser lors de la montée (main sur les épaules du siège)

LA PERSONNE SUR LA JOELETTE

- Doit peser au maximum le poids de la personne Pilote (arrière)
- Doit être munie d'un casque si possible
- Lui demander si elle est confortablement installée avant le départ et tout au long du trajet

### B. LA JOELETTE

MONTAGE	DEMONTAGE
<ol style="list-style-type: none"><li>1) Roue</li><li>2) Cale Pieds Serrer le manche en acier pour insérer le cale pieds</li><li>3) Basculer la Joëlette sur les bras arrière pour la poser sur les pieds</li><li>4) Vérifier la stabilité</li><li>5) Dossier (poignée à gauche sur l'arrière)</li><li>6) Bras droit et gauche avec la clef</li><li>7) Faire le transfert</li><li>8) Vérifier que le robinet (sous siège à droite) soit bien VERROUILLER</li></ol> <p>La personne sur la Joëlette doit être munie d'un casque Laisser toutes les goupilles et clefs à leur place</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Déverrouiller le robinet</li><li>2) Retirer les bras droit/gauche</li><li>3) Replier le dossier à l'aide de la poignée situer à gauche sur l'arrière</li><li>4) Basculer la Joëlette par les bras</li><li>5) Retirer le cale Pieds</li><li>6) Enlever la goupille de la roue et la remettre dans le trou de l'axe de la roue – tourner la roue pour l'amener à la parallèle du siège – en faisant attention à ne pas torsader le câble de frein</li></ol>
LEVER LA PERSONNE	DESCENDRE LA PERSONNE
<ol style="list-style-type: none"><li>1) Une personne freine pour bloquer la roue</li><li>2) Une personne se met à l'avant entre les bras et bloque les bras, proche du siège et pousse vers le haut</li><li>3) Appuyer sur le bout en acier (avec le pied) à côté de la roue pour passer la roue sous le siège</li><li>4) Vérifier que le robinet est bien fermé</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Inverse que pour la montée</li><li>2) Ouvrir le robinet</li><li>3) Une personne bloque les bras, entre les bras avant pour maintenir la Joëlette</li><li>4) Une personne à l'arrière pousse pour faire passer la roue sous le siège tout en maintenant le poids de la Joëlette</li></ol>